


# HINWEISE ZUM HANDLING UND ZUR LAGERUNG VON SPERMA

## 10 kritische Schritte für das Auftauen und die Besamung

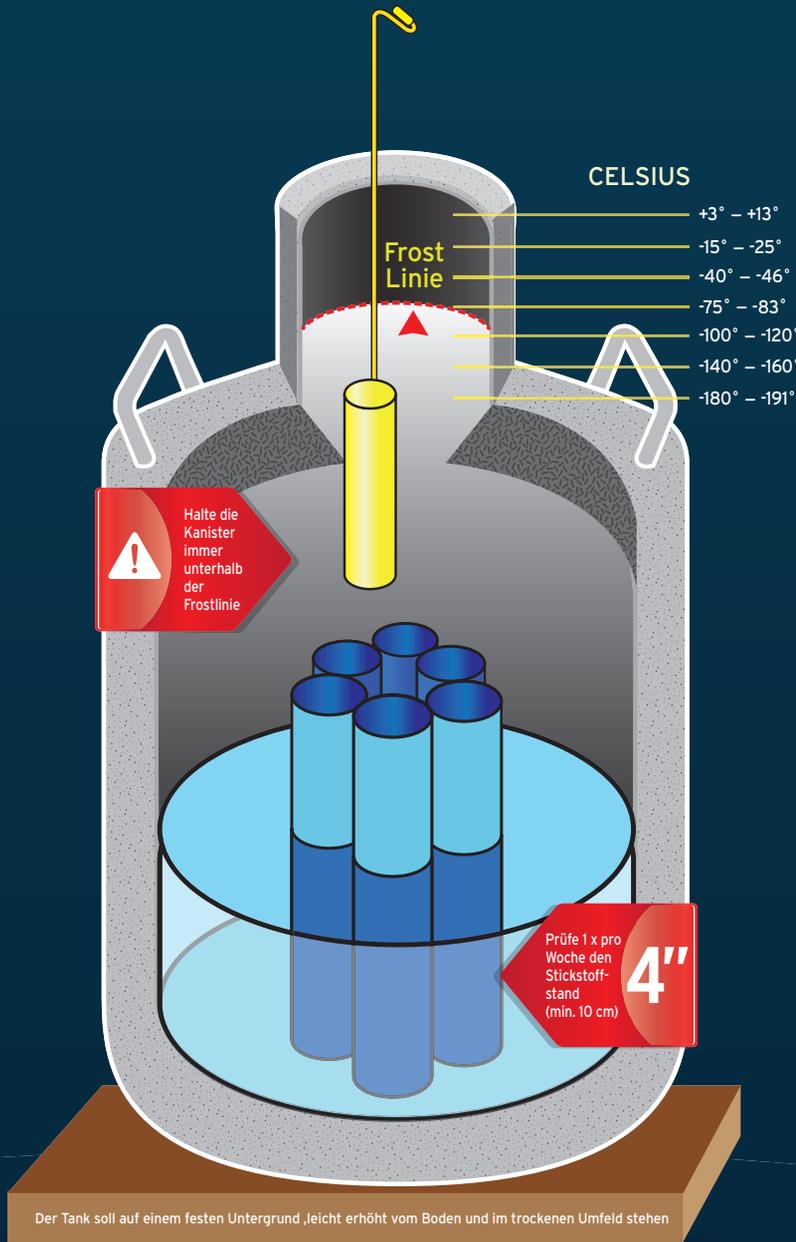

**1**  Nehme den Kanister aus seiner Lagerposition und arbeite immer unterhalb der Frostlinie. Die Kanister dürfen nicht länger als zehn Sekunden im Hals des Containers sein.

**2** Benutze eine vorgekühlte Pinzette! Die Portion in max. fünf Sekunden in das Auftaubad befördern.

**3**  Das Auftauen der Portion muss bei kontrollierter Temperatur erfolgen.

**35°C**  
für 45-60  
Sekunden

- a. Wenn mehrere Portionen aufgetaut werden, dann dürfen diese sich nicht berühren.
- b. Nur so viele Portionen auftauen wie Du bei gesextem Sperma in fünf Minuten oder sonst in zehn Minuten versamen kannst.

**4**  Die Pistole vorwärmen, um einen Kälteschock zu vermeiden.

**5**  Nimm die Paillette aus dem Auftaubad, trockne sie mit einem sauberen Tuch ab; berühre sie nicht mit bloßen Händen.

**6** Führe die Portion mit dem Stopfen voran in die Pistole ein.

**7**  Schneide die Paillette auf dem Niveau der Füllung im rechten Winkel ab; reinige die Schere danach.

**8** Führe die Paillette in die Seminette ein und fixiere die Seminette im Besamungsgerät. Bereite die Besamungspistole vor und ziehe eine Schutzhülle über die Pistole.

**9**  Wickle das Besamungsgerät in sauberes trockenes Papier, um es gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen zu schützen. Oder andere Optionen für eine konstante Temperatur gewährleisten, wie z.B. Gunwarmer

**10** Nach der Besamung sofort alle Daten zum Tier und zur Besamung erfassen:

DATUM:

TIER:

VERERBER:

BESAMER:

 Spermabestand muss nach jeder Besamung und Lieferung aktualisiert werden

Vergewissere Dich immer dass Hände, Handschuhe, Besamungspistole und alle anderen Geräte sauber sind und das Thermometer korrekt funktioniert.



Gesextes Sperma 4 - 8 Stunden später als konventionelles Sperma besamen

**SEMEX**<sup>®</sup>

Genetics for Life<sup>®</sup>

SEMEX Deutschland GmbH · Lindhooper Str. 54 · 27283 Verden · Tel. +49(0) 4231/9533-0  
info@semex-deutschland.de · www.semex-deutschland.de 