

SNELLE STARTERSGIDS



1

SCAN TSU DOZEN

Gebruik de Semex Solutions app of voer handmatig de TSU doos in het systeem in via het menu 'TSU to Cow'.



2

KOPPEL DE DNA-STALEN

Koppel vanuit de 'TSU to Cow' lijst de juiste TSU aan het dier waarvan u een oorbiopt afneemt.



3

NEEM EEN MONSTER UIT DE DOOS

Neem een buisje uit de doos.



4

PLAATS HET BUISJE IN DE KNIPTANG

Plaats de TSU in de kniptang met de perforator richting het handvat en de rode clip omhoog. Sluit het vergrendelmechanisme om de TSU vast te zetten.



5

VERGRENDEL

Knijp voorzichtig in het handvat van de kniptang totdat de perforator op zijn plek wordt vergrendeld.



6

VERWIJDER DE VEILIGHEIDSLIP

Laat de handvaten los en verwijder de rode plastic clip die de perforator beschermt. De kniptang is nu klaar voor gebruik.



7

NEEM HET OORBIOPT

Knijp de handvaten soepel samen en laat ze los om een monster af te nemen. Oorbiopten mogen niet te dichtbij de zijkant van het oor, hoofd of grote bloedvaten afgenomen worden. Het oor en de kniptang mogen tijdens de afname niet in aanraking komen met bloed, mest of slijm.



8

CONTROLEER HET OORBIOPT

Controleer of de TSU een groene indicator aan het uiteinde van de buis en een zichtbare hoeveelheid weefsel bevat. Gooi buisjes weg die lekken, beschadigd zijn of waarvan het weefsel niet volledig in het buisje zit.



9

VERWIJDER DE PERFORATOR

Trek de handvaten uit elkaar om het mesje voor eenmalig gebruik te verwijderen.



10

AANVRAAG INDIENEN

Doe de oorbiopten in een plastic zak, markeer de zak met het ordernummer van de app, bedrijfsnaam en datum. Verschillende orders mogen niet in dezelfde zak geplaatst worden, maar meerdere zakken kunnen samen worden verzonden.