

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO



1

## ESCANEAR LAS UNIDADES DE MUESTRA DE TEJIDO (TSU)

Utilizando la aplicación móvil de Semex escanear o manualmente entrar la unidad de muestreo de tejido (TSU) en el menú de inventario de unidades de muestreo de tejido.



2

## ACOPLAR LA MUESTRA CON LOS ANIMALES:

Trabajando con la lista "Muestra de tejido con vaca", "Animales Activos" o "Animales a testear" logramos acoplar correctamente la muestra con el animal a testear.



3

## REMOVER LA MUESTRA DE LA CAJA

Saque la muestra de la caja. Si alguna esta separada puede ser reensamblada. Unidades de muestra dañadas tienen que ser removidas del inventario.



4

## CARGAR LA MUESTRA

Colocar la unidad de muestreo de tejido dentro del tubo con el cortador y plástico rojo hacia arriba. Cerrar el mecanismo para asegurar la unidad de muestreo.



5

## CEBAR LA UNIDAD DE MUESTREO


Cuidadosamente mover las manijas del aplicador hasta cuando el cortador se asegure.



6

## REMOVER EL PEDASO DE SEGURIDAD (PLÁSTICO ROJO)

Suelte las manijas y remueva el (clip) plástico rojo que esta asegurando el cortador. El aplicador está listo para tomar la muestra.

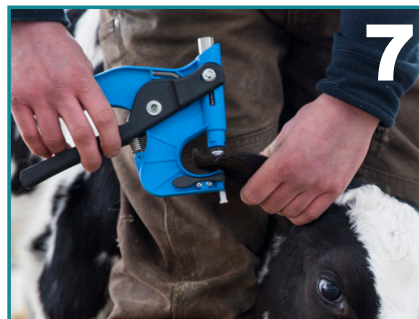

7

## TOMAR LA MUESTRA

Suavemente apretar las manijas al mismo tiempo y soltar la muestra. La muestra debe tomarse lejos del borde de la oreja, cabeza y venas. La muestra de oreja y aplicador deben estar libres de sangre, estiércol o moco cuando tomando la muestra.



8

## VERIFICAR LA MUESTRA

Verificar que la unidad de muestreo de tejido contenga una muestra verde al final del tubo y una cantidad de tejido visible. Deseche todas las muestras que presenten fugas, daño, o donde el tejido no está completamente sumergido en el tubo.



9

## REMOVER EL CORTADOR

Halar las manijas para remover el cortador, el plástico rojo debe ser reemplazado y luego descartado cuidadosamente.



10

## ENVIAR LAS ORDENES

Las muestras de cada día deben colocar en una bolsa de plástico marcada con el número de orden, nombre de la granja y fecha. Los pedidos no se pueden mezclar en la misma bolsa, pero varias bolsas pueden ser enviados juntos.