


1

Semex Solutions Phone App

- Lataa sovellus puhelimeen ja kirjaudu sisään.
- Puhelin päivittää sovelluksen aina kirjautumisen yhteydessä.
- Toimii vain Android- ja IOS järjestelmissä
- www.semex.com/semexsolutions/android (tai ios)

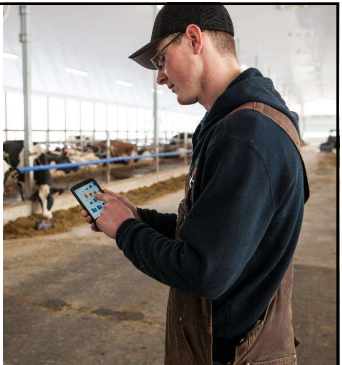

ELEVATE WITH SEMEX

2



Näytteiden keräys

- Laatikon näyteputket voidaan skannata tai syöttää manuaalisesti.
- Skannaa joko laatikon koodi tai yhden putken koodi tai syötä yhden putken koko numero.
- Skannatun laatikon kaikki putket ilmestyvät sovellukseen ja ovat käytettävissä.

ELEVATE WITH SEMEX

3



Testaustapa

- Jokainen näyte tulee liittää kyseisen eläimen tietoihin. Jos eläintä ei löydy listasta (esim. vastasyntynyt), eläimen nimi, korva, EU-tunnus ja syntymäaika syötetään ohjelmaan.
- Työskentely joko näytenuumerosta eläimeen tai eläimestä näytenuumeroon.

ELEVATE WITH SEMEX

4



Näytteenotto

- Valitse näyteputket laatikosta järjestyksessä sekaannusten välttämiseksi.
- Tarkista huolellisesti, että yhdistät oikean putken numeron oikeaan eläimeen.
- Työskentele loogisesti aina samalla tavoin.

ELEVATE WITH SEMEX

5



Näytteenotto

- Ota testattavalle eläimelle linkitetty putkilo laatikosta ja lataa se pihteihin.
- Paina pihtejä varovasti, kunnes tunnet, että näyte lukkiutuu paikoilleen.
- Vapauta kahva ja irrota punainen suojuus. Pihdit ovat nyt valmiit keräykseen.

ELEVATE WITH SEMEX

6



Näytteenotto

- Ota näyte painamalla pihtejä napakasti.
- Ota näyte vähintään 3 sentin päästä korvan reunasta, vältä rustoja ja verisuonia.
- Kun olet ottanut näytteen, irrota neula vetämällä pihtien kahvoja pois päin toisistaan. Laita punainen suoja suojaamaan neulan kärkeä ja hävitä neulat asianmukaisesti.

ELEVATE WITH SEMEX

7

Näytteenotto

- Tarkista näyte silmämääräisesti.
- Vihreän merkkitäplän tulee näkyä näyteputkilon sisällä sen pohjan lähellä.
- Näyteputken suulla on punainen merkki.
- Näytteen täytyy näkyä putkilon sisällä.
- Laita valmis näyte muovipussiin.



ELEVATE WITH SEMEX

8

Huomioi näytteitä kerätessäsi:

- Ole rauhallinen, vältä eläinten stressaantumista.
- Huolehdi turvallisuudesta, kun otat näytteitä suurikokoisista eläimistä.
- Huomioi, että kertakäyttöinen näytteenottoneula on erittäin terävä. Neula hävitetään yhdessä muiden neulojen kanssa.



ELEVATE WITH SEMEX

9

Tarkistus ja tilauksen lähettäminen

- Kun näytteet on kerätty, tehdään tilaus. Täydennä mahdollisesti puuttuvat tiedot ja korjaa virheet.
- Vain yksi lähetyksessä sallitaan. Varmista että olet kerännyt kaikki näytteet ennen kuin painat "tarkista ja läheta" nappia.



ELEVATE WITH SEMEX

10

1 pussi – 1 tilaus – 1 päivä

- Muista aina laittaa yhteen pussiin yhden näytteenottokerran tilaus.
- Sulje pussi heti kun olet kerännyt kaikki näytteet
 - Tilan nimi
 - Keräyspäivä
 - Tilausnumero




ELEVATE WITH SEMEX

11

Lähetä tilaus laboratorioon

Laita pussit valmiiseen kuoreen

Voit lähettää kerralla useampia tilauksia (pusseja)



Genbank-Semex Hungary Ltd.
Attn: Genomic Samples
Kulterulet 0646/45
Mezőhegyes, Hungary
H-5820

ELEVATE WITH SEMEX

12