

ELEVATE PIKAOHJE



1 SKANNAA NÄYTELAATIKKO

Avaa sovellus kännykästä ja skannaa tai kirjaa manuaalisesti putkilolaatikko.



2 YHDISTÄ PUTKI ELÄIMEEN

Yhdistä näyteputki eläimeen tai eläin näyteputkeen.



3 OTA PUTKI LAATIKOSTA

Ota putki laatikosta. Osat voidaan liittää takaisin jos irtoavat toisistaan.



4 LATAA PIHDIT

Aseta putki pihteihin niin että leikkuri jää kahvan puolelle ja punainen suojus ylöspäin.



5 KIRISTÄ PUTKILO PAIKALLEEN

Purista varovasti pihtejä kunnes tunnet että putkilo lukittuu kireälle.



6 POISTA SUOJUS

Poista punainen suojus. Suojus irtoaa, kun putki on kiristetty paikalleen oikein. Pihdit ovat nyt valmiina.



7 OTA NÄYTE

Ota näyte korvasta vähintään n 3 cm päästä reunasta. Vältä verisuonia ja karvoja. Suomessa vain eläinlääkäri saa ottaa näytteen.



8 TARKISTA NÄYTE

Tarkista, että putkilon sisällä on vihreä merkkiväri ja että putken suulla on punainen merkki. Kudosnäytteen pitää näkyä putken sisällä.



9 POISTA LEIKKURI

Työnnä kahvoja pois päin toisistaan, jolloin leikkuri irtoaa. Laita punainen suojus takaisin ja hävitä yhdessä muiden neulojen kanssa.



10 TILAA NÄYTEPUSSI LÄHETYS

Laita näytteet pussiin. Paina kännykkäsovelluksen Tilauspainiketta, korjaa tiedot tarvittaessa ja lähetä tilaus. Aseta pussi kirjekuoreen ja lähetä näytteet.

ELEVATE™ WITH SEMEX