



Semex Solutions


SEMEXWORKS
OPTIMATE
DAIRYTRACK
ELEVATE



SEMEX[®]
Genetics for Life[®]

Semex Solutions Phone App

- Lataa sovellus puhelimeen ja kirjaudu sisään.
- Puhelin päivittää sovelluksen aina kirjautumisen yhteydessä.
- Toimii vain Android- ja IOS järjestelmissä
- www.semex.com/semexsolutions/android (tai ios)

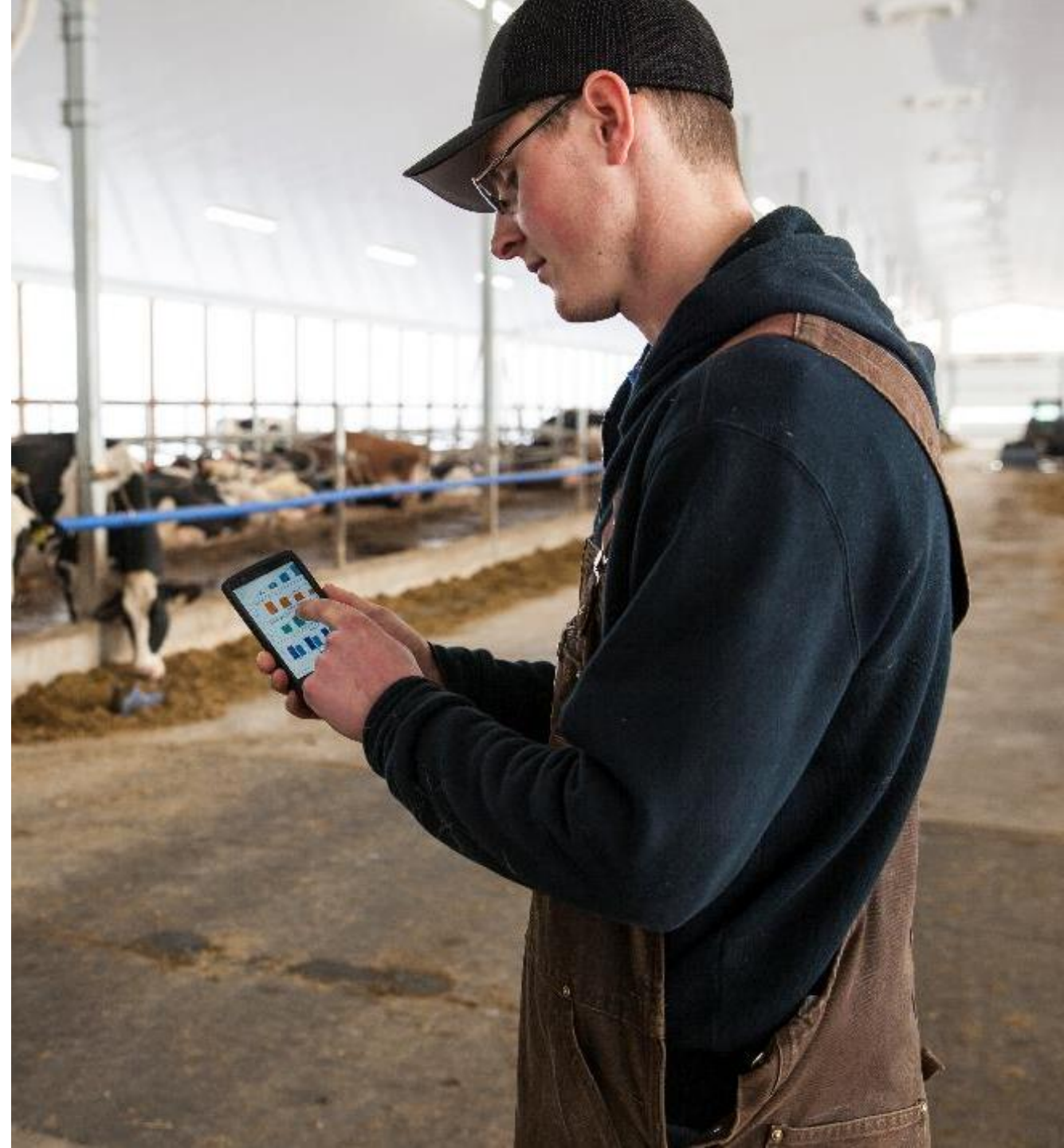

Näytteiden keräys

- Laatikon näyteputket voidaan skannata tai syöttää manuaalisesti.
- Skannaa joko laatikon koodi tai yhden putken koodi tai syötä yhden putken koko numero.
- Skannatun laatikon kaikki putket ilmestyvät sovellukseen ja ovat käytettävissä.

Testaustapa

- Jokainen näyte tulee liittää kyseisen eläimen tietoihin. Jos eläintä ei löydy listasta (esim. vastasyntynyt), eläimen nimi, korva, EU-tunnus ja syntymäaika syötetään ohjelmaan.
- Työskentely joko näytenerosta eläimeen tai eläimestä näyteneroon.



Näytteenotto

- Valitse näyteputket laatikosta järjestyksessä sekaannusten välttämiseksi.
- Tarkista huolellisesti, että yhdistät oikean putken numeron oikeaan eläimeen.
- Työskentele loogisesti aina samalla tavoin.

Näytteenotto

- Ota testattavalle eläimelle linkitetty putkilo laatikosta ja lataa se pihteihin.
- Paina pihtejä varovasti, kunnes tunnet, että näyte lukkiutuu paikoilleen.
- Vapauta kahva ja irroita punainen suojus. Pihdit ovat nyt valmiit keräykseen.





Näytteenotto

- Ota näyte painamalla pihtejä napakasti.
- Ota näyte vähintään 3 sentin päästä korvan reunasta, vältä rustoja ja verisuonia.
- Kun olet ottanut näytteen, irrota neula vetämällä pihtien kahvoja poispäin toisistaan. Laita punainen suojus suojaamaan neulan kärkeä ja hävitä neulat asianmukaisesti.

Näytteenotto

- Tarkista näyte silmämääräisesti.
- Vihreän merkkitäplän tulee näkyä näyteputkilon sisällä sen pohjan lähellä.
- Näyteputken suulla on punainen merkki.
- Näytteen täytyy näkyä putkilon sisällä.
- Laita valmis näyte muovipussiin.



Huomioi näytteitä kerätessäsi:



Ole rauhallinen, vältä eläinten stressaantumista.



Huolehdi turvallisuudesta, kun otat näytteitä suurikokoisista eläimistä.



Huomioi, että kertakäyttöinen näytteenottoneula on erittäin terävä. Neula hävitetään yhdessä muiden neulojen kanssa.



Tarkistus ja tilauksen lähettäminen

- Kun näytteet on kerätty, tehdään tilaus. Täydennä mahdollisesti puuttuvat tiedot ja korjaa virheet.
- Vain yksi lähetys päivässä sallitaan. Varmista että olet kerännyt kaikki näytteet ennen kuin painat “tarkista ja lähetä” nappia.



1 pussi – 1 tilaus – 1 päivä

- Muista aina laittaa yhteen pussiin yhden näytteenottokerran tilaus.
- Sulje pussi heti kun olet kerännyt kaikki näytteet
 - Tilan nimi
 - Keräyspäivä
 - Tilausnumero



Lähetä näyteputket laboratorioon

Laita pussit valmiiseen
lähetyskuoreen.
Postimaksu on maksettu.

Voit lähettää kerralla
useampia tilauksia.
Näytteet säilyvät
muovipussissa useita
kuukausia
huoneenlämmössä.



Semex Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Strasse 6
27283 Verden
Deutschland